

Кабель переходной с
линейным коннектором
для соединения с
четырёхконтактными
электродами



Назначение

Кабель переходной линейным коннектором предназначен для передачи стимулирующего сигнала от блока генератора «НейСи-3М», через передающую и приемную антенны на четырехконтактные электроды диаметров 1,2 и 2мм.

Особенности

- Конструкция коннектора позволяет подключать любые электроды.
- Кабель переходной может служить как удлинитель для установки приемной антенны в подходящем для пациента месте либо как переходник с коннектора диаметром 2 мм на 1,2мм.

Обозначение	Φ С
МИДН12.195.00.00	1,2
-01	2,0

*С – диаметр подключаемых электродов

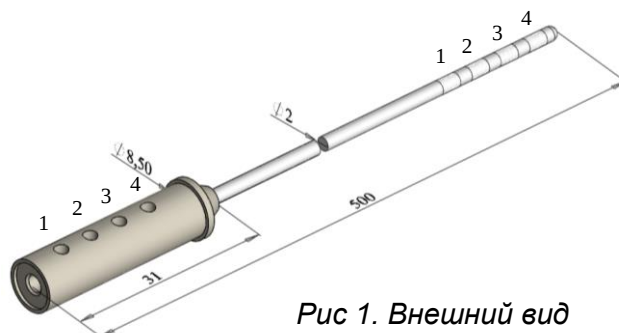


Рис 1. Внешний вид кабеля

Способ применения

- Кабель устанавливается открытым способом.
- Для установки кабеля с линейным коннектором необходимо:
- снять герметизирующий чехол с коннектора Рис.2;

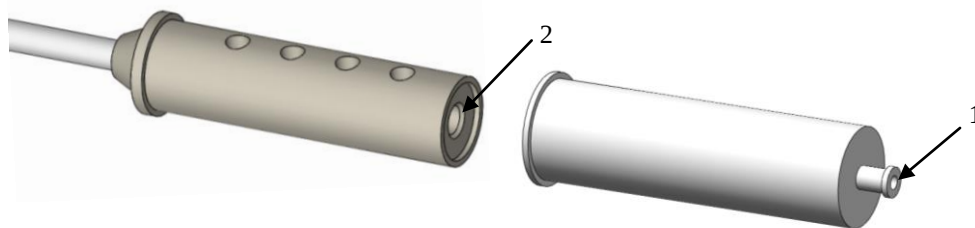


Рис 2. Коннектор и чехол

- подключаемый электрод протянуть через отверстие 1, Рис.2. чехла.
- вставить проксимальный конец подключаемого электрода в отверстие 2, Рис.2. коннектора до упора.
- Подключение производится путем вкручивания винтов Рис.3, позиции 1,2,3,4

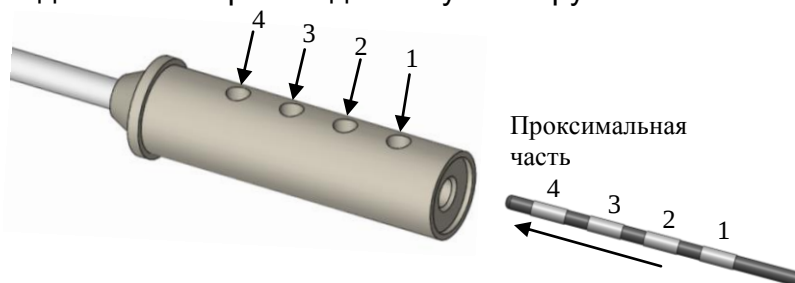


Рис 3. Подключение коннектора

- Надеть на коннектор герметизирующий чехол.
- Зафиксировать чехол с помощью нитей(обязательная фиксация в двух местах), как показано на Рис.4.

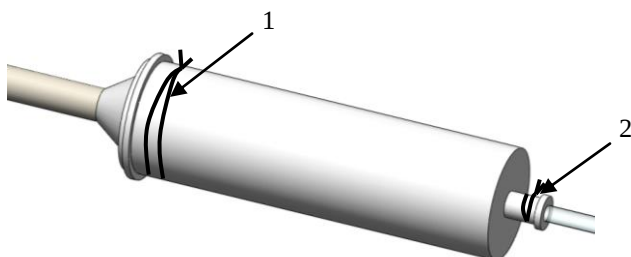


Рис 4. Фиксация чехла нитями

Технические характеристики.

Вес, не более, г

15