

Антенна приемная с линейным коннектором для соединения с четырехконтактными электродами



Назначение

Антенна приемная линейным коннектором предназначена для передачи стимулирующего сигнала от блока генератора «НейСи-3М», через передающую антенну на четырехконтактные электроды диаметров 1,2 и 2мм.

Особенности

- Антенна работает в двухканальном режиме.
- Конструкция коннектора позволяет подключать любые электроды.
- Не требует источника питания.
- Имеет неограниченный рабочий ресурс.
- Миниатюрные размеры имплантируемой приемной антенны (Ø27х7,4мм) позволяют производить имплантацию в различные участки тела пациента с минимальным косметическим дефектом.

Обозначение	С	L
МИДН12.189.00.00	1,2	220
-01	1,2	420
-02	1,2	620
-03	2,0	220
-04	2,0	420
-05	2,0	620

*С – диаметр подключаемых электродов

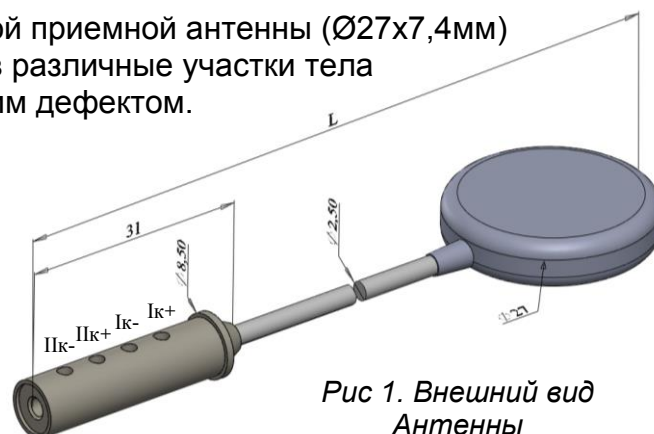


Рис 1. Внешний вид
Антенны

Способ применения

- Антенна устанавливается открытым способом.
- Приемная часть антенны (Ø27мм) устанавливается метками внутрь на глубину не более 10 мм.

Для установки приемной антенны с линейным коннектором необходимо:

- снять герметизирующий чехол с коннектора Рис.2;

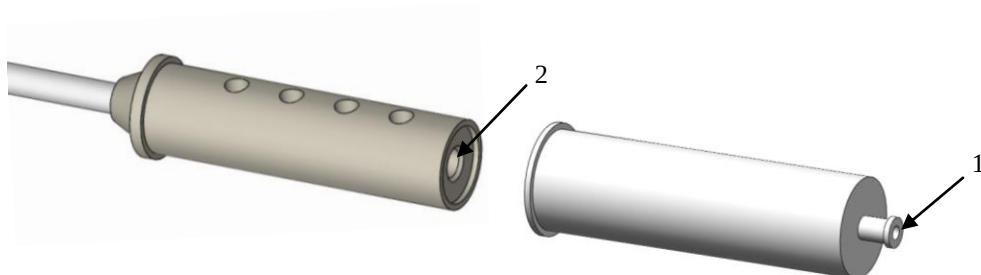


Рис 2. Коннектор и чехол

- подключаемый электрод протянуть через отверстие 1, Рис.2. чехла.
- вставить проксимальный конец подключаемого электрода в отверстие 2, Рис.2. коннектора до упора.
- Подключение производится путем вкручивания винтов Рис.3, позиции 1,2,3,4



Рис 3. Подключение коннектора

- Надеть на коннектор герметизирующий чехол.
- Зафиксировать чехол с помощью нитей(обязательная фиксация в двух местах), как показано на Рис.4.

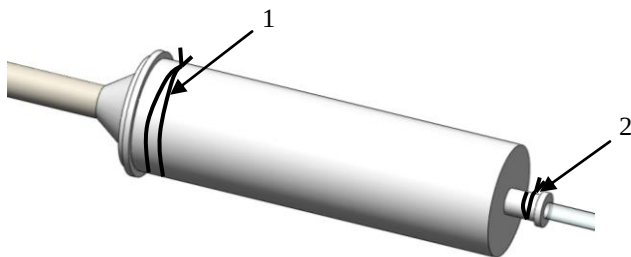


Рис 4. Фиксация чехла нитями

Технические характеристики.

Вес, не более, г

20